

COMO USAR Y APLICAR ESTROTECT™ INDICADOR REPRODUCTIVO

Crítico para obtener los mejores resultados

ANTES DE APLICAR CALENTAR LOS ESTROTECT INDICADOR REPRODUCTIVO



ESTROTECT Indicador Reproductivo deben calentarse a 100° F o 38° C inmediatamente antes de la aplicación. Esto ablanda el adhesivo y

proporciona adhesión instantánea a temperaturas bajas. Para pequeñas cantidades menos de cinco ESTROTECT Indicador Reproductivo, el calentamiento dentro de la ropa es aceptable dando un tiempo adecuado. Para grandes cantidades, coloque los indicadores en una pequeña hielera con una botella de

agua caliente u otra fuente de calor, ya que esto es más efectivo y consistente. **Recuerde, ESTROTECT Indicador Reproductivo siempre debe ser suave y flexible a la aplicación para una adhesión óptima.**

SITIO DE APLICACIÓN



La ubicación ideal está a la mitad entre los huesos de la cadera y los huesos de la cola con el ESTROTECT Indicador Reproductivo ubicado perpendicular/atrasando a la columna vertebral. Alta incidencia de Mosca, Mosquitos y otros poner EstroTECT en primera vertebra de la cola.

LIMPIAR EL PELO



Cree condiciones óptimas para la adhesión limpiando muy bien el pelo de la columna vertebral en el medio de la grupa. Limpiar en dirección del pelo para eliminar la suciedad, el polvo y la caída del pelo en época de cambio del clima. El cepillo de goma ESTROTECT o un paño rustico es recomendado ya que no levanta la caspa y el aceite del cuero cabelludo.

LIMPIAR EL PELO



Limpie la superficie con el paño de limpieza ESTROTECT (incluido) para que elimine por completo la suciedad, el polvo, la arena o el aserrín restantes. Al igual que con el cepillado, limpie en dirección del pelo y doble el paño de limpieza según sea necesario. El paño de limpieza ESTROTECT es efectivo siempre que sea pegajoso.

APLICACIÓN ESTROTECT INDICADOR REPRODUCTIVO



Coloque el Indicador Reproductivo en la mitad de la grupa entre los huesos de cadera y hueso cabeza de cola. Aplique el indicador firmemente y frotar para que toda la superficie se pegue con el pelo. Recuerde que el indicador se pega en el pelo por este motivo queremos que la pega este maleable por el calentamiento sugerido. **NO use ESTROTECT Indicador Reproductivo con alcohol o productos a base de aceite o aerosoles, Pour-On o Spray para**

moscas ya que dañarán al indicador. Hacerlo anulará cualquier garantía. No aplicar en días lluvioso y vacas mojadas.

REPUESTAS Y RESULTADOS



BREED



DON'T BREED


Cuando las vacas han sido montadas, la superficie plateada y negra del ESTROTECT Indicador Reproductivo - con el NUEVO "Breeding Bullseye™" - se frota por la fricción de la monta, revelando el color del indicador (rojo/naranja, verde, azul, amarillo o

fucsia) Con cada monta, la superficie plateada y negra revelará gradualmente el color del indicador, la que indica un Estro/Celo franco o Status Q. Una vez que el Breeding Bullseye área negra se frota, o un área equivalente, es indicativo que el animal está en celo franco y se debe iniciar el protocolo de reproducción/inseminación. Cuando ESTROTECT Indicador Reproductivo se activa por la actividad de monta, el color del indicador debe aparecer muy brillante y pulido. El color del indicador será menos frecuente e intenso en entornos y condiciones de alto estrés, clima cálido/húmedos, pisos no aptos o deteriorados, la alta producción o en condiciones de hacinamiento ya que las vacas pueden estar menos inclinadas a montar. Si se ejecuta varios programas o grupos reproductivos, use colores diferentes del ESTROTECT Indicador Reproductivo. Por ejemplo, use un color diferente para cada inseminación para definir cuántas veces se ha inseminado al animal. Usar color amarillos para personas que no ven ciertos colores o son daltonicos.

Visite www.estroTECT.com Para obtener más información, en programas reproductivos con el uso de ESTROTECT Breeding Bullseye.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante dos años a partir de la fecha de fabricación. Lo idóneo del producto es para los fines previstos del Comprador y es responsabilidad del Comprador. La responsabilidad se limita al valor de reemplazo del producto.

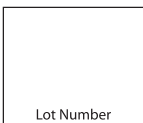

Lot Number



ESTROTECT™
BREEDING INDICATOR

www.estroTECT.com

©Rockway, Inc. All rights reserved.

EstroTECT, As Good As A Bull and Breeding Bullseye are trademarks of Rockway, Inc. Customer Service: 1-800-559-9704

